


Ⓟ
Prótesis

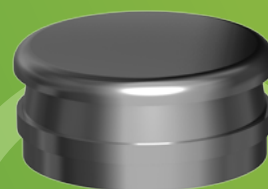

 AlphaBio^{TEC}
Simplantology

 AlphaLoc

Retenedores para
Sobredentaduras sobre Implantes

Altura mínima. Retención superior.

Retenedores para Sobredentaduras sobre Implantes AlphaLoc

"Es un componente flexible de altura mínima que ofrece un nivel superior de retención"

Dr. Yoav Grossmann,
Odontólogo,
Prostodoncista Senior del Centro
Médico Sheba, Israel

Alpha-Bio Tec, una empresa líder en soluciones dentales, presenta sus nuevos retenedores para sobredentaduras AlphaLoc, que ofrecen a los odontólogos y a los laboratorios soluciones múltiples para todas las situaciones clínicas, inclusive en casos particulares de espacios interoclusales estrechos y divergencia entre implantes.

El sistema de retenedores para sobredentaduras sobre implantes AlphaLoc está diseñado para su uso con prótesis totales o parciales, retenidas en parte o en su totalidad, por implantes endoóseos ya sea en el maxilar superior como inferior.

AlphaLoc ha sido especialmente diseñado para lograr una compatibilidad óptima con el sistema de implantes de hexágono interno de Alpha-Bio Tec, lo que permite un nivel superior de precisión en la rehabilitación.

AlphaLoc es una solución eficiente, confiable, económica y duradera.



Tapas de retención

Están disponibles en cuatro niveles de fuerza de retención y pueden utilizarse para rehabilitar un implante con cualquier ángulo de divergencia requerido (para ángulos extremos se recomienda UniCover de Alpha-Bio Tec).

Características Principales y Beneficios

Primera en dimensiones. Primera en resultados.

AlphaLoc posee el perfil vertical más bajo del mercado (2.1 mm) y el ancho más pequeño (4.5 mm) en comparación con los retenedores para sobredentaduras sobre implantes disponibles actualmente.

- Ideal para utilizar en espacios interoclusales estrechos
- Ofrece una amplia variedad de soluciones para procedimientos clínicos
- El diseño compacto del sistema beneficia tanto a los odontólogos como a los técnicos ya que les brinda una libertad incomparable a la hora de planificar y ejecutar procedimientos

Beneficios principales:

- Minimiza las fuerzas oclusales y laterales sobre el implante
- Refuerza el espesor y la resistencia del acrílico de la sobredentadura
- Más fácil de manipular para el paciente
- Resultados estéticos superiores
- Versatilidad: la diversidad de opciones de retención y angulación ofrece una gran variedad de soluciones clínicas.
- Amplia gama de pilares AlphaLoc con diferentes alturas gingivales para tejidos de diversas profundidades
- Compuestos por la misma aleación de titanio de los implantes de Alpha-Bio Tec, especialmente recubiertos de TiN (estaño) para minimizar la fricción y maximizar la vida útil del sistema

Diseñados con niveles de retención adaptables a cada necesidad.

Los diversos niveles de retención de los machos de nylon pueden adaptarse según el caso clínico específico.



Fuerte
2.5 Kg





Suave
1.2 Kg



Estándar
1.8 Kg




Extrasuave
0.6 Kg

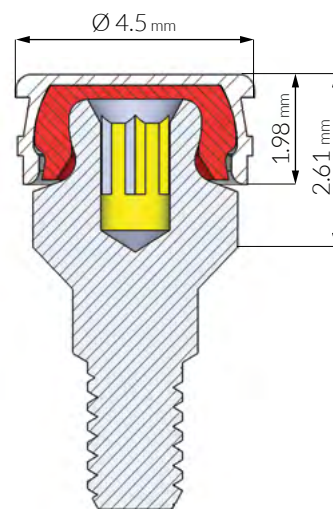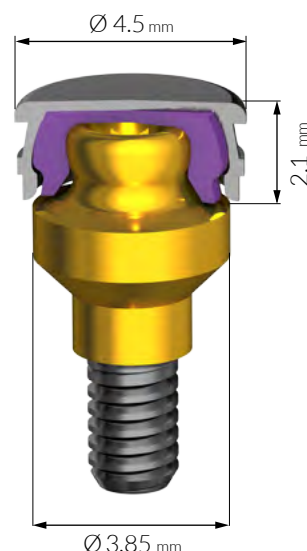


Características Principales y Beneficios

Opciones versátiles de tratamiento

Máxima versatilidad para su adecuación a diferentes profundidades de tejido

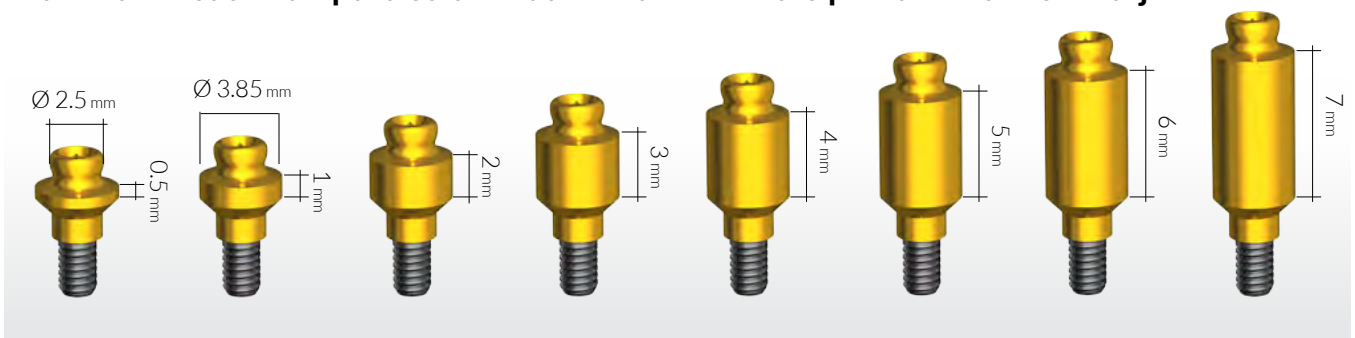


Diseñados para su uso con implantes paralelos y no paralelos

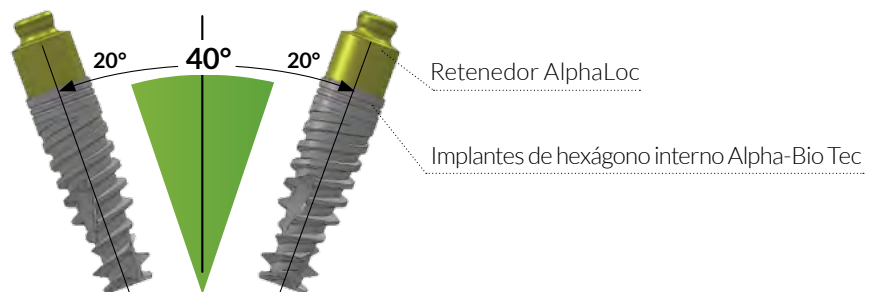

Se necesitan 4 tapas de retención para corregir la divergencia de hasta 40° entre implantes.



Se recomienda el uso de UniCover para casos de divergencia mayor a 28 grados entre implantes, lo que permite aumentar la vida útil de las tapas y minimizar la cantidad de visitas de control posteriores al procedimiento.

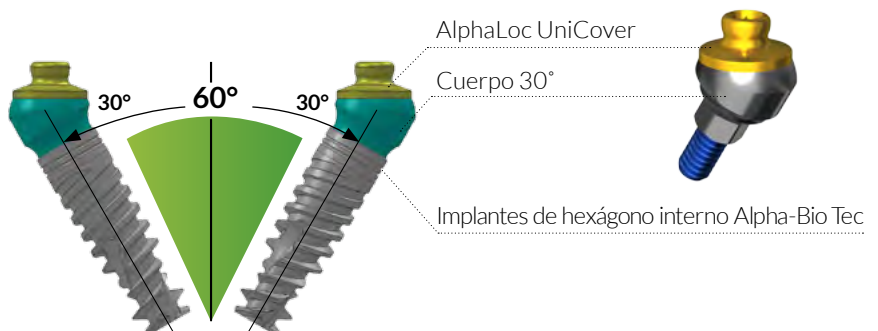

Características Principales y Beneficios









Compatibilidad

- Especialmente diseñado para una total compatibilidad con todos los sistemas de implantes de hexágono interno de Alpha-Bio Tec.
- Aptos para todas las herramientas estándar de Alpha-Bio Tec.
- Destornillador manual hexagonal 1.25/contrá ángulo con montura para motor/llave de torque como se muestra a continuación

La conexión de las piezas debe realizarse a 30 Ncm utilizando una llave de torque

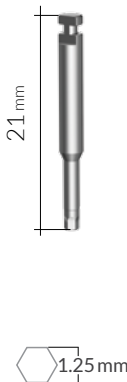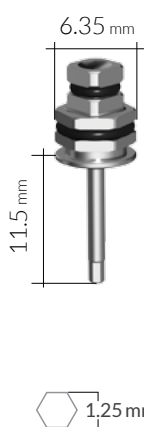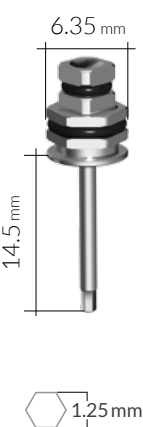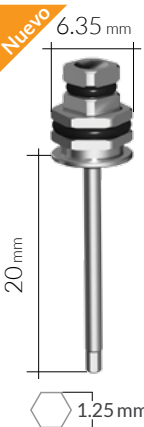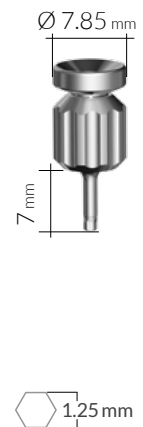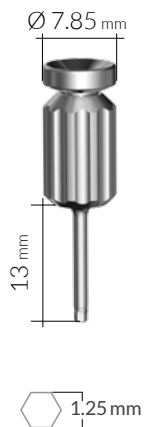


	Contra ángulo con montura para motor	Destornillador hexagonal corto	Destornillador hexagonal	Destornillador hexagonal largo	Destornillador manual corto	Destornillador manual
						
N° de ref.	4165	4056	4055	4061	4053	4052
Instrucciones	Debe utilizarse con un motor para contra ángulo	Apto para torquímetro tipo hexagonal de 6.35 mm (¼ de pulgada) o cuadrada de 4 mm			Para uso manual	

Proceso de Trabajo

Etapas clínicas


1 Luego de la implantación

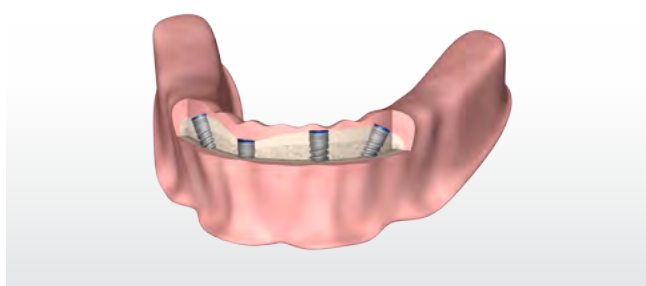


2 Exposición de los implantes




3 Pilares de cicatrización

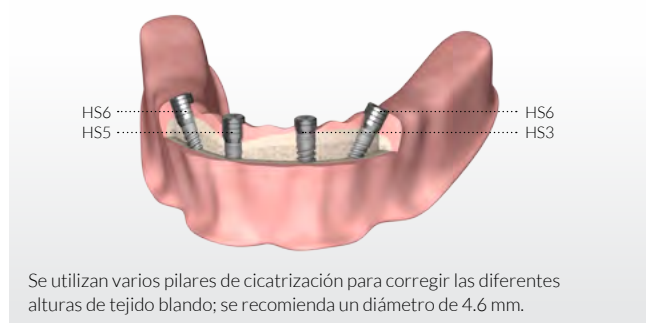


4 Colocación del UniBase

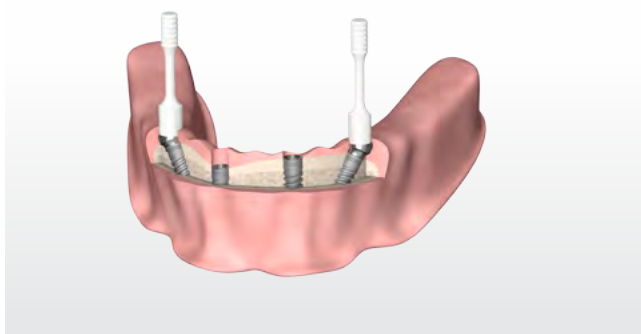

5 Conexión de los retenedores

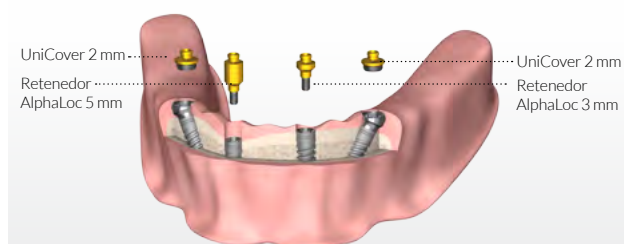


Para igualar la altura de los retenedores, colocar los retenedores AlphaLoc sobre el implante y el UniBase

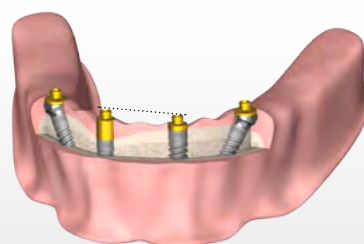

Pueden utilizarse retenedores AlphaLoc de diversas alturas y conexiones para equalizar las alturas

6 Toma de impresiones utilizando cofias para impresión AlphaLoc

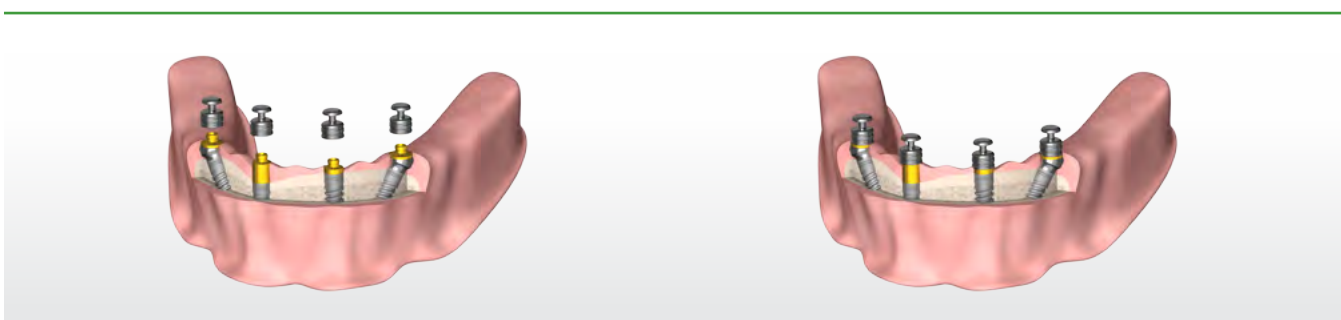


7 Colocar la cofia para impresión sobre los retenedores AlphaLoc y el UniBase

La cofia de impresión se retira junto con la impresión



8 Insertar el análogo en la cofia de impresión y colocar el modelo maestro

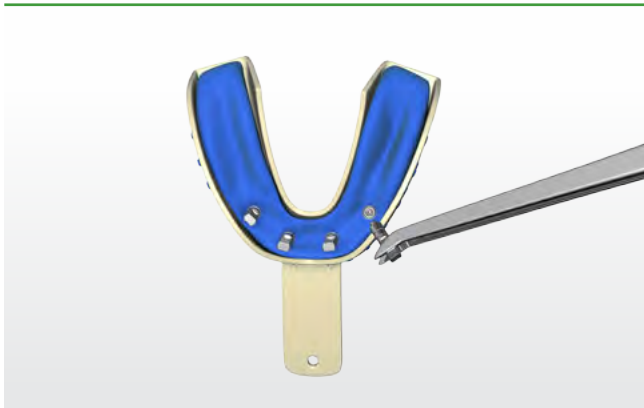

Proceso de Trabajo



Etapas de laboratorio

(El técnico coloca la estructura metálica y las tapas de retención)

- 9 Fabricación del modelo maestro
Modelo maestro con los análogos en su posición
-



- 10 El técnico fija la sobredentadura a la estructura
-

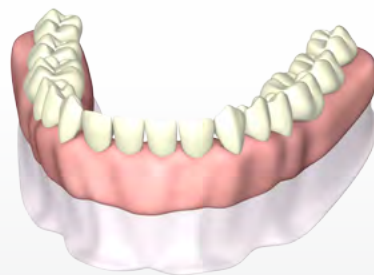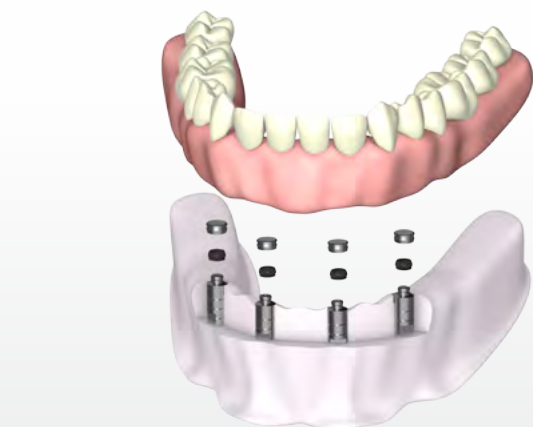

En el consultorio

11 Preparación de la prótesis


11a. Opción 1

El técnico realiza los preparativos para la retención de la estructura metálica



Opción 2

El odontólogo realiza los preparativos para la retención de la estructura metálica en el consultorio

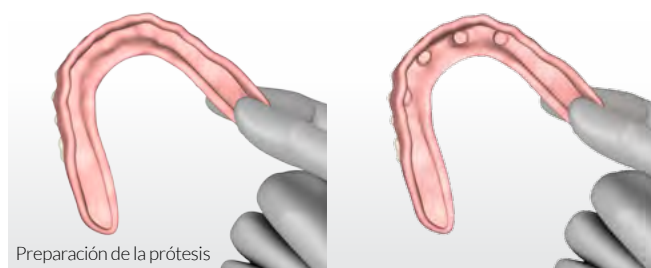


11b. La altura recomendada entre el reborde del retenedor y el tejido blando sano es de 1 mm


Debe controlarse que los espacios y la pasividad de los retenedores de la estructura metálica sean los adecuados dentro de los preparativos

Utilizar un anillo espaciador para corregir posibles zonas retentivas entre los pilares AlphaLoc


Fijar cuidadosamente la estructura de metal y la prótesis utilizando resina autopolimerizable.

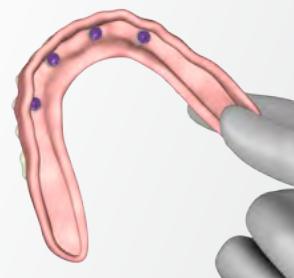

12 Colocación de la prótesis en la boca del paciente





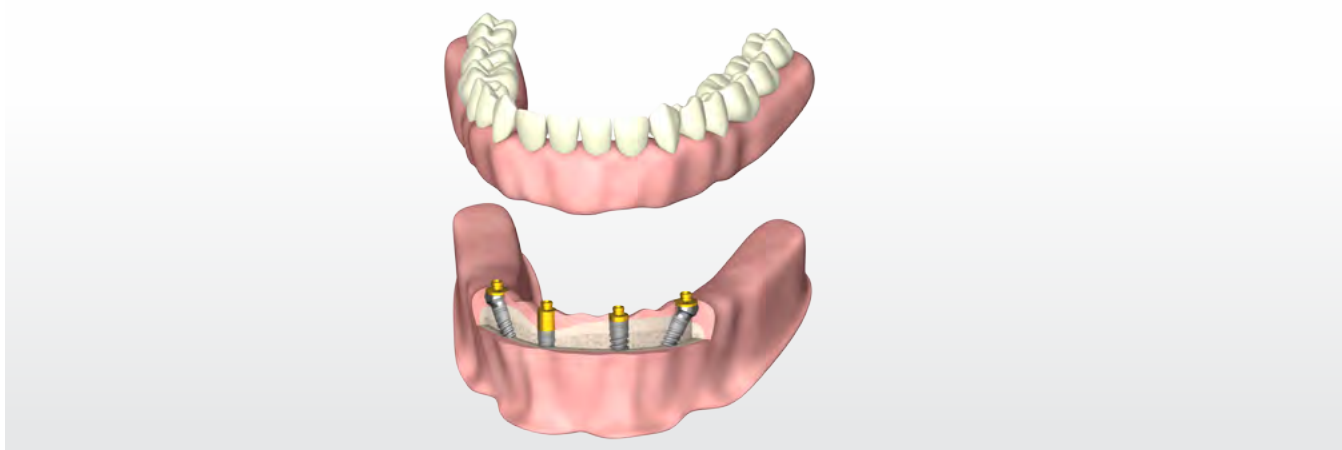


Información del Catálogo

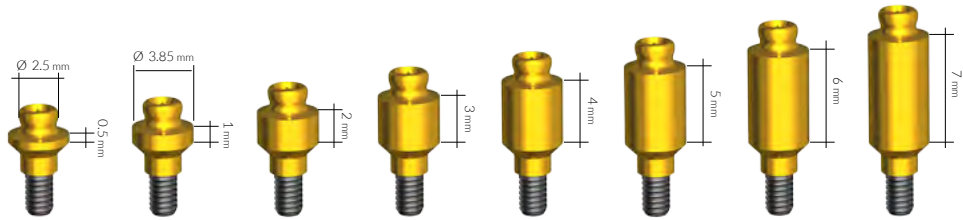Retenedores AlphaLoc de aleación de titanio con recubrimiento de TiN (estaño)								
								
Altura	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
Nº de Ref. de los retenedores (disponibles por unidad, independientemente del set de productos)	4859	4860	4861	4862	4863	4864	4865	4866
Kit's Ref. No. Kit de AlphaLoc: 1 retenedor, 1 estructura metálica de acero inoxidable, 4 tapones de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio								
	4867	4868	4869	4870	4871	4872	4873	4874
								
Paquete de piezas macho para procesamiento AlphaLoc								
								
Nº de ref.	4875							
Incluye	Estructura de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto. (en color violeta, transparente, rosa o amarillo), cofia de laboratorio (negra)							



Macho de repuesto AlphaLoc				
				
Nº de ref.	4876	4877	4878	4879
Nivel de retención	fuerte (violeta)	estándar (transparente)	suave (rosa)	extrasuave (amarillo)

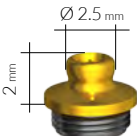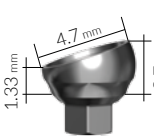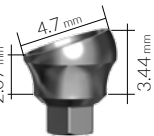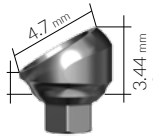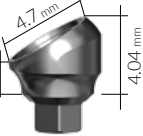UniCover AlphaLoc conectado al UniBase	UniCover AlphaLoc de aleación de titanio con recubrimiento de TiN	UniBase			
					
Ángulo		17°		30°	
Altura	2 mm	1.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
Nº de ref.	4880	5308	5309	5312	5313

	Cofia de laboratorio AlphaLoc (negra)	Anillo espaciador AlphaLoc*	Cofia para impresión AlphaLoc	Análogo hembra AlphaLoc	Herramienta de inserción AlphaLoc	Herramienta de extracción AlphaLoc
						
Contenido	4 Unidades	1 Unidad	4 Unidades	4 Unidades	1 Unidad	1 Unidad
Nº de ref.	4882	4883	4884	4885	4886	4887

* Al conectar la estructura metálica y la prótesis con acrílico fluido en la boca del paciente, se debe utilizar el disco para aislar las zonas retentivas del retenedor.



Prótesis

© Alpha-Bio Tec - Todos los derechos reservados 995-0283 R2/02.15



Soluciones inteligentes en Implantología

www.alpha-bio.net



NUESTRA GARANTÍA - SU TRANQUILIDAD

Para más información, visite nuestro sitio: www.alpha-bio.net

Los productos de Alpha-Bio Tec cuentan con el sello de conformidad de la Comunidad Europea, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC y la Enmienda 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec cumple con las normas ISO 13485: 2012 y con el sistema canadiense para la evaluación de conformidad de dispositivos médicos (CMDCAS). La disponibilidad de los productos varía según el país.

EC REP MEDES LIMITED. 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts WD7 7AR. UK. Tel/Fax: +44 1923859810